
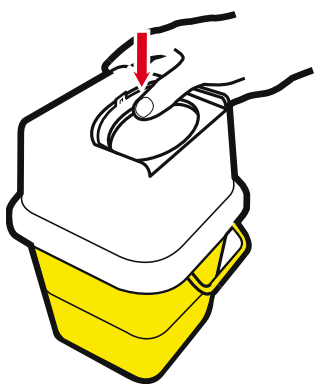


# Gebrauchsanweisung Sharpsafe® Kanülenbehälter


## ➔ Montage und Benutzung der Kanülenabwurfbehälter Sharpsafe®

**Ein korrekt montierte Behälter = Sicherheit!**

Montieren Sie den Behälter so, dass die maximale Fülllinie zusammen mit dem Etikett nach vorne zeigt.

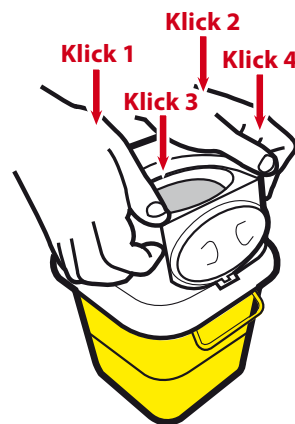


↑ Provisorisch  
**verschließen** nach  
jeder Benutzung (1 Klick)

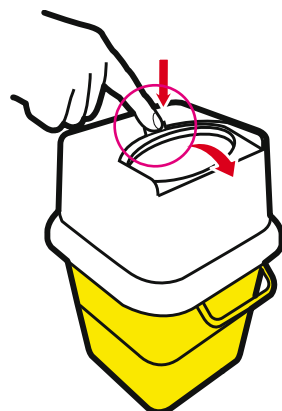

↑ Erneut öffnen:  
**Plastikflasche** nach  
vorne drücken



↑ Die maximale  
Füllhöhe  
**nie überschreiten!!!**

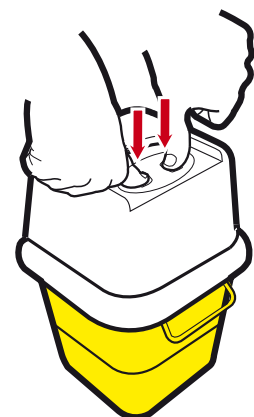

↑ Definitiver Verschluss:  
Durch **starken Druck** mit  
2 Daumen

## ➔ Abkopplungsmöglichkeiten



Grosse Öffnung

Luerslip Safe Abkopplung

Luerlock Safe Abkopplung

Integrierte Sicherheitsklappe für  
Sharpsafe® 2L-3L-4L-7L

Drastische Reduzierung der Stichverletzungen:  
Die Sicherheitsklappe verhindert eine  
zusätzliche Befüllung, sobald die maximale  
Füllhöhe erreicht ist sowie ein Herausfallen  
des Inhaltes im Falle des Umkippen.

## ➔ 5 Gebote um Stichverletzung zu vermeiden



**1 Nadel-Recapping ist  
verboten!**



**2 Benutzen Sie immer einen  
korrekt montierten und  
stabilen Kanülenbehälter**



**3 Benutzen Sie den  
Kanülenbehälter an Ort und Stelle**




**4 Keine spitzen und scharfen Gegenstände  
herumliegen lassen**



**5 Niemals etwas aus einem Kanülenbehälter  
herausnehmen und den Kanülenbehälter  
nie überfüllen und immer die  
maximale Fülllinie beachten.**



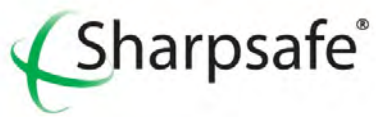

## Nur 4 « Klicks »

Vergewissern Sie sich, dass der Behälter korrekt montiert ist



**DAHLHAUSEN®**

# Sichere Entsorgung von Sharps an Ort und Stelle

## Was bedeutet das in der Praxis?



# Es ist deutlich!

## Nie über die Linie befüllen




Jetzt noch mehr Abkopplungsmöglichkeiten  
für Sharpsafe 2 – 3 – 4 – 7 Liter



## 5 Gebote zur **sicheren Anwendung** von Kanülenbehälter

- 1 Recapping ist sehr gefährlich!  
**Es stellt die häufigste Quelle für infektiöse Nadelstichverletzungen dar**
- 2 Niemals etwas **aus einem Kanülenbehälter** herausnehmen
- 3 Keine spitzen und scharfen Gegenstände **herumliegen lassen.**
- 4 Spitze und scharfe Gegenstände gehören **nicht in den Hausabfall**
- 5 Den Kanülenbehälter nie überfüllen:
  - **Respektieren Sie die maximale Fülllinie**
  - **Montieren Sie den Behälter so, dass die maximale Fülllinie nach vorne zeigt**

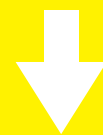

NEW GENERATION

Sharpsafe ist BS7320, TÜV-GS, NFX-30-500 und UN geprüft

Manufactured by:

www.frontiermedical.eu

Marketed by:

MSH nv, Torenstraat 20, B-3384 Glabbeek  
Tel.: +32 (0)16 77 89 31 - Fax: +32 (0)16 77 12 40  
info@msh.be - www.msh.be



# Stichverletzung vermeiden

## Nadeln vom Insulin-Pens abkoppeln

Die Behälter sind einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssysteme



Standfuß



Pflegetablett klein




Pflegetablett medium

Führen Sie die Nadel vom Insulin-Pen in das Loch 'Pen Safe'




Kippen Sie den Pen in der Öffnung gleichzeitig nach unten. So wird die Nadel im 'Pen Safe' arretiert

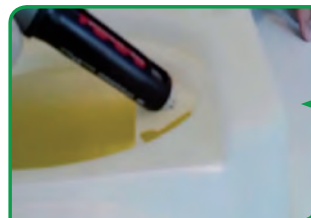

Machen Sie mindestens 3 komplette Drehungen indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen (nach links)

Kippen Sie den Pen nach Oben

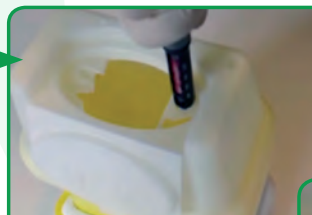

Ziehen Sie den Pen mit leichtem Druck zur Seite der Abkopplung nach Oben



Die Nadel fällt im Behälter

